

Anvendelse: Hydrozid® bruges til kryoterapi af vorter og andre hudlæsioner.

Indhold: 200 ml HFC-134a (norfluran).
Applikationsskabeloner. Brugsanvisning.

Fremgangsmåde: Hydrozid® sprayes på det givne hudområde direkte fra beholderen. Der sprayes fra 2-3 cm afstand og i 2-6 sekunder, afhængigt af læsionens placering. Anvend Hydrozid i henhold til illustration A, B, C. Ved illustration A er sprayhovedet lukket. Ved illustration B er sprayhovedet åbent og klar til brug (illustration C). I løbet af én behandling anbefales op til 6 gentagne fryse-tø cyklusser - med op til ½ minuts mellemrum. Den samlede tid, der sprayes på læsionen, skal holdes inden for den anbefalede maksimale behandlingstid. For at undgå at beskadige det omkring liggende raske væv kan en vedlagt applikationsskabelon anvendes ved at vælge det hul i skabelonen, der svarer til størrelsen af den enkelte læsion. I nogle tilfælde kan gentagne behandlinger være nødvendige for helt at fjerne hudlæsionen. Når gentagne behandlinger er nødvendige, anbefales et behandlingsinterval på 1-2 uger. Kryoterapi kan give en stikkende eller brændende fornemmelse på huden. Nekrose af epidermale celler kan resultere i udviklingen af en blære. Fuld heling tager omkring 10 til 14 dage. Overbehandling kan medføre hypopigmentering, ar eller postinflammatorisk hyperpigmentering.

Kontraindikationer: Kryoterapi er kontraindiceret hos patienter med cryoglobulinemia, Raynauds sygdom, kuldeurticaria, bloddyskrasier eller usikker diagnose.

Forsigtighed: Spray aldrig på slimhinder, åbne sår, rifter samt sart eller eksematøs hud. Forsigtighed tilrådes med hensyn til behandlingstid hos børn og personer med sart og aldrende

hud. Spray ikke på rask hud. Uforsigtig anvendelse kan føre til uønsket beskadigelse af huden og det underliggende væv, herunder nerver. Må ikke inhaleres. Undgå kontakt med øjnene. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Vigtigt: Hydrozid® bør kun anvendes af uddannet sundhedspersonale. De vedlagte applikationsskabeloner må kun anvendes sammen med Hydrozid®. På grund af risikoen for smitte bør hver skabelon kun anvendes til én og samme hudlæsion. Hydrozid® er ikke brandbart og kan bortskaffes med almindeligt affald.

Hydrozid® kan bestilles på www.hydrozid.com

Anbefalede maksimale behandlingstider
for forskellige typer læsioner:

Hudlæsion	Maks. Behandlingstid i sekunder
Verruca plantaris/Fodvorte/ Plantar vorte	36 (6×6 sek.)
Verruca vulgaris/Almindelig vorte	36 (6×6 sek.)
Verruca plana/Flad vorte	18 (6×3 sek.)
Keratosis seborrhoica/Aktinisk keratose/Solar keratose	36 (6×6 sek.)
Lentigo (facial)/Leverpletter/ Alderdomspletter	12 (6×2 sek.)
Lentigo (non-facial)/Leverpletter/ Alderdomspletter	36 (6×6 sek.)
Acrochordon/Stilkevorte	36 (6×6 sek.)
Keratosis actinica (facial)/ Aktinisk keratose	12 (6×2 sek.)
Keratosis actinica (non-facial)/ Aktinisk keratose	36 (6×6 sek.)
Molluscum contagiosum/ Molluskler	18 (6×3 sek.)
Condyloma/Kondylomer/Kønsvorter	36 (6×6 sek.)
Gingival melanin pigmentering/ Mørkpigmenteret tandkød	36 (6×6 sek.)
Blødning fra livmoderhalsen ved fysisk påvirkning	36 (6×6 sek.)

